

Bonopty®

Sistema de Biópsia Óssea

Informações processuais

Localização: Washington, DC, EUA
Hospital: Washington Hospital Center
Médico: C Logie, MD
S. Dziedzic, MD
J. Jelinek, MD

Revisão de Caso Clínico 10

Biópsia percutânea de lesão intramedular femoral

Descrição do caso

Caso clínico

Homem de 56 anos com lesão condróide dolorosa do côndilo femoral medial.

Detalhes da biópsia

A lesão estava localizada dentro do côndilo femoral medial. Utilizando o conjunto de penetração Bonopty® 12G (art nº 12-1272), a lesão foi abordada posteromedialmente, adjacente à inserção das fibras profundas do ligamento colateral medial. A lesão foi então amostrada usando Bonopty® 13G Biopsy Set (art no 12-1273).

Análise das amostras

A lesão foi amostrada com sucesso sem violação do plano de ressecção planejado. O encondroma foi confirmado.

Comentários


A grande amostra obtida pela agulha de biópsia de calibre 13 permitiu a análise histopatológica ideal da lesão condróide duvidosa.

Bonopty®


Sistema de Biópsia Óssea

Revisão de Caso Clínico 10


Biópsia percutânea de lesão intramedular femoral

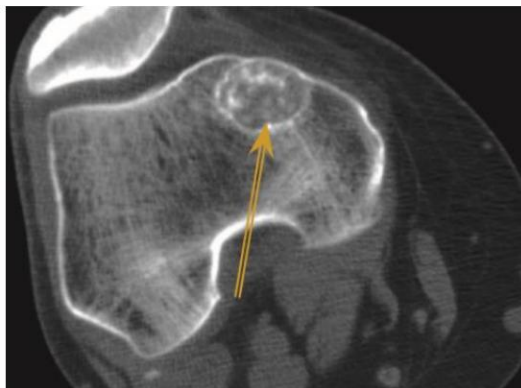


Lesão geográfica 1A no côndilo femoral medial com matriz condróide.

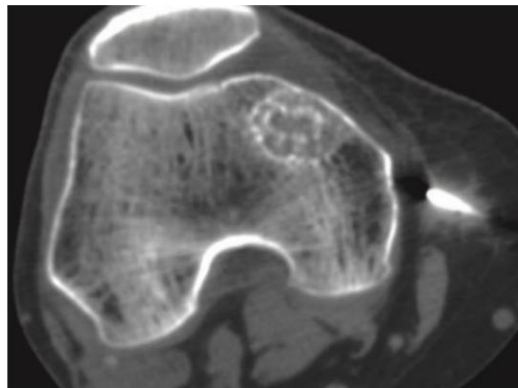

Conjunto de penetração Bonopty® 12G avançado em tecidos moles.

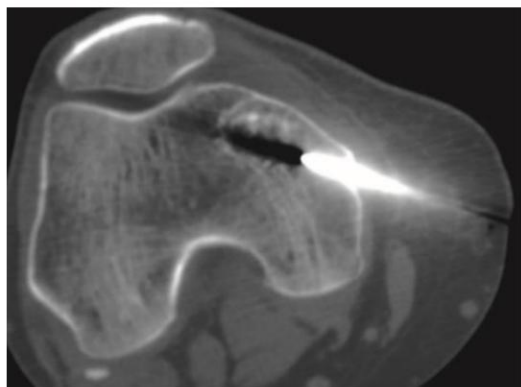

Conjunto de penetração Bonopty® 12G mais avançado, antes da remoção do estilete interno.

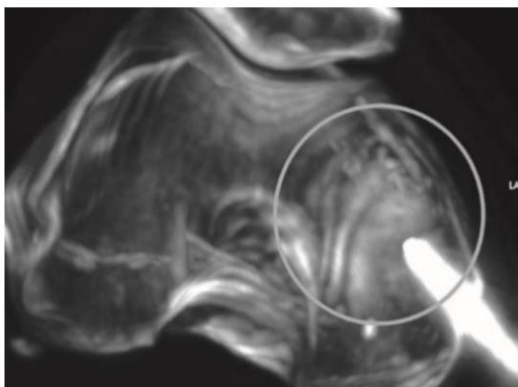

Reconstrução 3D MIP do póstero-medial abordagem usando Bonopty®.

Caso e imagem cortesia de C Logie, MD; S. Dziedzic, MD; J. Jelinek, MD; Washington Hospital Center, Washington, DC, EUA.

apriomed.com

 Biópsia de lesões ósseas. Antes de usar o Sistema de Biópsia de Osso Coaxial Bonopty®, leia as instruções de uso que acompanham o produto para indicações, contra-indicações, advertências e precauções. Bonopty® é uma marca registrada da AprioMed AB. Patentes pendentes.

AprioMed 