

Morrison

Steerable Needle®

Informações processuais

Data do procedimento: novembro de 2014

Localização: Uppsala, Suécia

Hospital: Hospital Universitário de Uppsala

Médico: dr. Abdulsaleh Shahin

Revisão de Caso Clínico 2

Bloqueio terapêutico do nervo L5 direito

Descrição do caso

História do caso

O paciente apresentava dor radicular ao longo da distribuição L5 direita e foi encaminhado para bloqueio terapêutico do nervo. No entanto, um segmento de transição na junção lombossacral deixou muito pouco espaço para a entrada no forame neural.

Detalhes processuais

Morrison Steerable Needle® foi usado para acesso guiado por TC no nível L5-S1 no lado direito. A ponta da Morrison Steerable Needle® foi inserida no forame neural. A curva foi implantada, permitindo maior aproximação da raiz nervosa de L5. Uma suspensão de 1 ml de Marcaína e 1 ml de Depo-Medrol foi então injetada com sucesso. Não ocorreram complicações processuais.

Resultados e comentários


Neste procedimento, Morrison Steerable Needle® permitiu o avanço controlado da agulha, curvando-se cuidadosamente em torno de obstáculos ósseos no forame L5-S1, permitindo a colocação precisa da ponta da agulha.

Morrison

Steerable Needle®

Revisão de Caso Clínico 2


Bloqueio terapêutico do nervo L5 direito

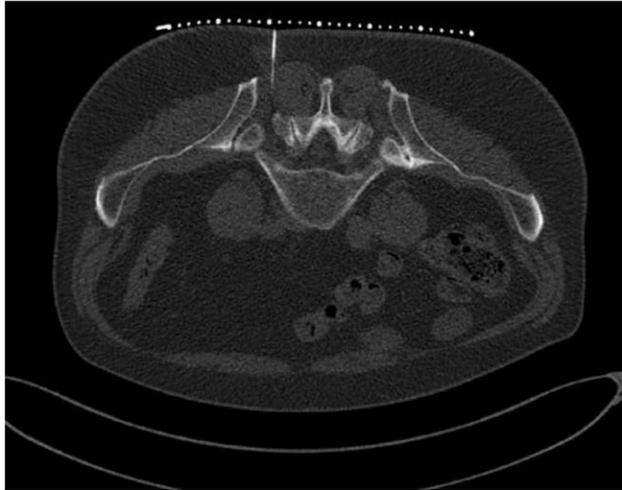

Morrison Steerable Needle® inserido e avançado diretamente para a região de interesse.



Morrison Steerable Needle® é ligeiramente curvado e avança cuidadosamente no L5 área.

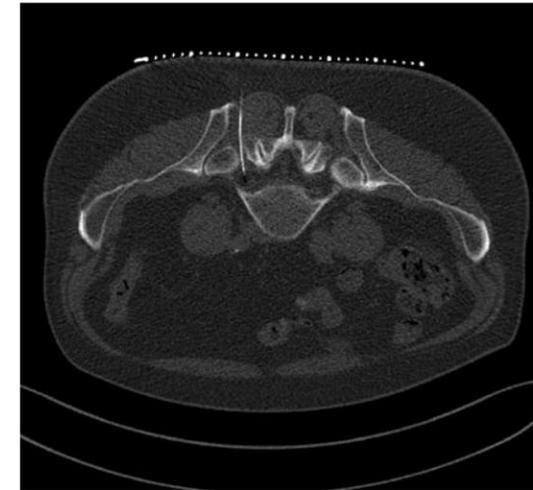

A ponta da agulha é posicionada perto da parte intraforaminal do nervo L5.

Caso e imagem cortesia do Dr. Abdsaleh Shahin, Uppsala University Hospital, Uppsala, Suécia

apriomed.com

Antes de usar Morrison Steerable Needle®, leia as instruções de uso que acompanham o produto para indicações, contra-indicações, advertências e precauções Morrison Steerable Needle® é uma marca registrada da AprioMed AB. Patentes pendentes.

AprioMed 